



PL 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 187/189  
tel. +48 42 640 48 70, fax +48 42 688 33 84

## Instrukcja używania woskowych kęsków zgryzowych



Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej [www.wiedent.com.pl](http://www.wiedent.com.pl) w zakładce oferta/woski dentystyczne/woskowe kęski zgryzowe.

### Przeznaczenie

Woskowe kęski zgryzowe to wyrób medyczny klasy I przeznaczony do ustalenia u pacjenta położenia szczęki górnej w stosunku do żuchwy.

### Opis

Woskowe kęski zgryzowe cechują się bardzo dobrą plastycznością uzyskaną dzięki zastosowaniu do produkcji wosku pszczelego i żywic naturalnych.

### Surowce użyte do produkcji

W skład wyrobu wchodzi woski naturalne, parafiny syntetyczne i barwnik do parafin.

### Sposób postępowania

Kęsek woskowy uplastyczniać przed użyciem wkładając do ciepłej wody lub trzymając nad płomieniem palnika. Przygotowany w ten sposób wosk włożyć do jamy ustnej pacjenta. Wysunięte brzegi wosku od strony wargowej i policzkowej uformować dociskając do zębów.

### Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

Okres użytkowania wyrobu zależy od sposobu jego przechowywania. Woskowe kęski zgryzowe nieprawidłowo przechowywane mogą z upływem czasu tracić plastyczność, kolor i formę.

### Opakowania

Woskowe kęski zgryzowe oferowane są w opakowaniach po 21 sztuk.

### Warunki przechowywania i transportu

W opakowaniach, w suchym, nie nasłonecznionym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Woskowe kęski zgryzowe trzeba zużyć w czasie nie dłuższym niż 3 lata od wyprodukowania.

### Podstawa prawna

Woskowe wały zwarciove spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.

### Stosowane symbole



Wytwórca



Przestrzegać instrukcji używania



Znak zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745



Ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania



Chronić przed światłem słonecznym



Produkt jest wyrobem medycznym



Nr serii



Termin ważności

